

## Rampes pliables 692


### Descriptif du produit

Charger un scooter dans une voiture devient facile grâce à ces rampes pliables. Elles vous permettent de charger ou décharger des scooters ou des fauteuils roulants, même lourds, dans votre véhicule.

Sac de rangement inclus. Un jeu de rampes 692 contient 2 rampes.



### Caractéristiques techniques

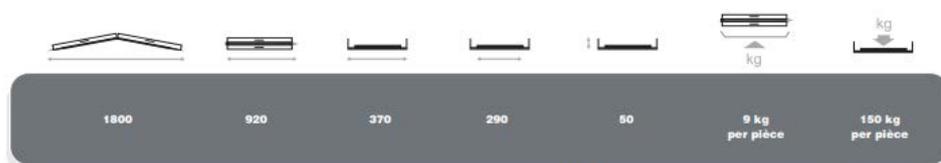

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg

**01** Poignées pour transporter les rampes facilement

**02** Surface antidérapante pour une meilleure adhérence du fauteuil roulant ou du scooter

Charge maximale 150 kg par rampe **03**



### Utilisation des rampes

Les rampes sont très faciles à utiliser :

1. Dépliez la rampe.
2. Placez le revêtement antidérapant sur le bord du coffre ou de la surface à franchir.
3. Assurez-vous que les rampes sont stables
4. Conduisez le scooter ou le fauteuil roulant à vide sur les rampes

**04** Fourni avec un revêtement antidérapant pour une meilleure adhérence des rampes



31 Cours des Juillottes 94700 Maisons-Alfort

Tél : 01 60 43 61 45

E-mail : [info@accenciaa.com](mailto:info@accenciaa.com) - Web : [www.accenciaa.com](http://www.accenciaa.com)