



Notice d'utilisation Emetteur sans fil Amplicall 140

Contenu de la boîte


La boîte de l'AC140 contient les éléments suivants:

- 1 station de base AC140
- 1 adaptateur secteur CA/CC
- 1 adaptateur de prise britannique et 1 adaptateur de prise VDE (européen)
- 1 micro-capteur (50cm)
- 1 autocollant adhésif double face pour le montage du micro capteur
- 1 rallonge micro de 1,5 m et de 3,5 mm
- 1 guide d'utilisation
- 2 vis et 2 chevilles
- 1 gabarit de perçage
- pièces d'icônes de sonnette et 2 pièces d'icônes de bébé

Description

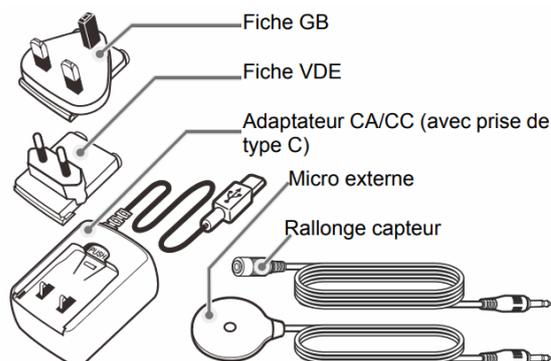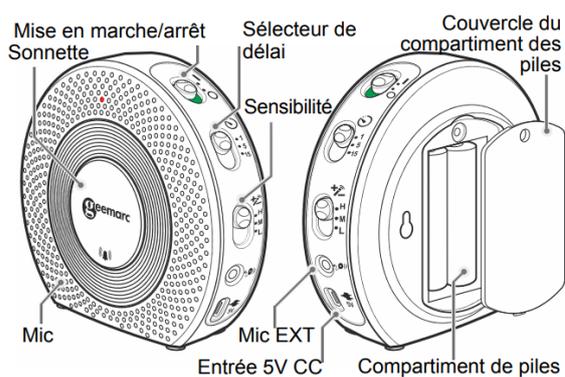


Raccordement de votre appareil

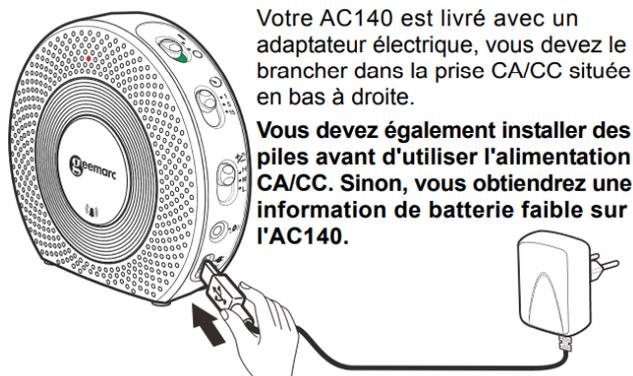

Votre AC140 est livré avec un adaptateur électrique, vous devez le brancher dans la prise CA/CC située en bas à droite.

Vous devez également installer des piles avant d'utiliser l'alimentation CA/CC. Sinon, vous obtiendrez une information de batterie faible sur l'AC140.

Vous avez la possibilité d'ajouter 2 piles alcalines AA 1,5V (non fournies) si vous souhaitez que votre appareil puisse fonctionner en cas de panne de courant ou sans adaptateur.

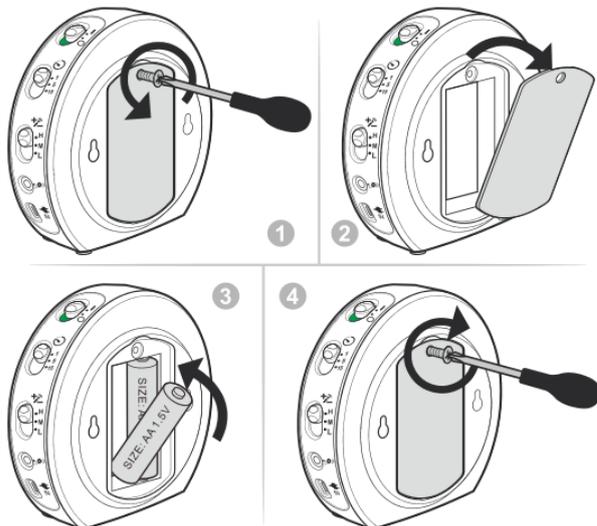


1. Retirez la vis.
2. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.
3. Insérez les 2 piles alcalines AA 1,5V en respectant la polarité.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles.
5. Remettez la vis.

Enregistrement

L'AC140 fonctionne avec les récepteurs AMPLICALL et doit être appairé avant d'être utilisé.


Pour enregistrer votre nouvel appareil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:

1. Entrez en mode enregistrement pour récepteur AMPLICALL.
Appuyez sur le bouton **Programmation**(●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Programmation** (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez vous jumeler.
Appuyez sur le **bouton de sélection de la mélodie** (♪) pour faire défiler les mélodies. Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.
3. Une fois que l'icône de zone et la mélodie sont sélectionnées, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil AC140 pour effectuer l'enregistrement. Si le résultat est positif, le récepteur AMPLICALL produira deux courtes tonalités.

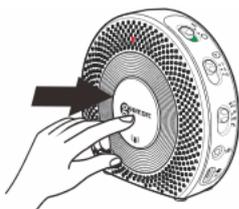

Appuyez sur le bouton **Programmation** (●) pour quitter le mode enregistrement ; le système est maintenant prêt à être utilisé.

Réglage

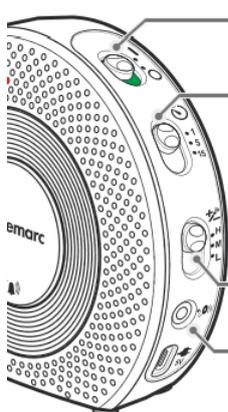

Interrupteur Marche/Arrêt: Faites glisser le commutateur sur la position « **Arrêt** » lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.


Délai: Vous pouvez sélectionner un délai de 5, 10 ou 15 secondes en utilisant cette interrupteur. Si par exemple la durée sélectionnée est de 5 secondes, cela signifie que le récepteur AMPLICALL émettra un son 5 secondes après le captage des pleures du bébé.

Sensibilité: Ce bouton permet de sélectionner la sensibilité du micro (Fort, Moyen ou Faible).


Micro externe: Vous pouvez brancher le capteur externe à ce jack. Le micro interne est coupé lorsque le micro externe est installé.

Fonctionnement

Utilisation du microphone **interne**:

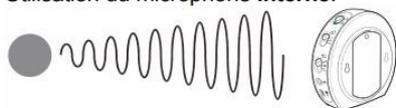


Utilisation du microphone **externe**:

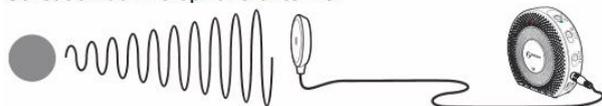

Réglez la distance (entre le microphone et la source sonore) et la sensibilité en fonction du type et de l'intensité de la source sonore.

Conflit de codes

Si le code de l'AC140 est le même que celui d'un autre émetteur, vous devez changer le code. Veuillez suivre la procédure ci-dessous. Vous devrez enregistrer de nouveau votre appareil à son récepteur AMPLICALL.

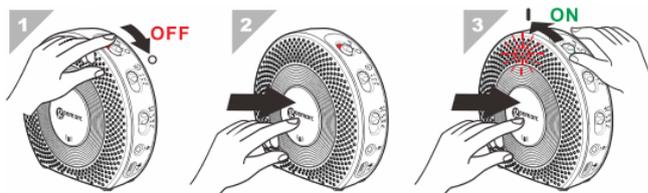


1 Mettez l'interrupteur en position **ARRÊT**.

2 Appuyez sur le bouton de sonnette et maintenez-le enfoncé.

3 Mettez l'interrupteur en position **marche**. Ne relâchez pas le bouton de la sonnette, avant que le voyant LED ait cligné 6 fois.

Montage

Le capteur peut être posé sur la table ou fixé au mur.

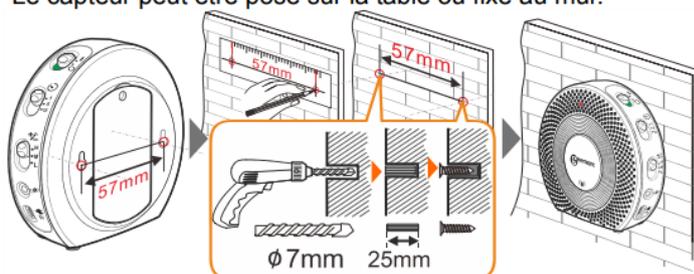

Dessinez deux trous sur le mur à l'aide d'un crayon.
Fixez l'appareil au mur ou au plafond.