

BoucleTTe Emetteur de rayonnement magnétique

Descriptif du produit

Le **boucleTTe** est un émetteur de rayonnement magnétique, mini boucle malentendants selon NF 60118-4.

Réalisée en technologie exclusive planar, circuit rayonnant imprimé, **boucleTTe** est doté d'un **ampli miniaturisé classe D**, **faible consommation** et alimenté par **piles 9 V**.

En **utilisation continue**, une pile tient **20 heures**.



Un agent mobile face à malentendant appareillé « T » doit pouvoir être compris immédiatement.


Avec **boucleTTe**, la mini boucle mobile, il rayonne à une portée de 80 cm et parle mains-libres avec son micro-cravate.

L'interlocuteur malentendant commute sa prothèse et entend l'émission **boucleTTe** ; fort et clair.

boucleTTe répond à des multiples situations de dialogue : infirmière, vente nomade, Maître d'hôtel, guide de visite, examinateur médical, animateur événementiel ...

Caractéristiques techniques

- étui souple L 100 x H 160 x P 35 mm avec cordon réglable
- boîtier électronique ABS
- circuit rayonnant planar
- mini ampli 6 W classe D
- 2 piles 9 V
- interrupteur
- micro-cravate
- autonomie
 - fonctionnement continu : piles 20 h
 - fonctionnement alterné : piles 100 h

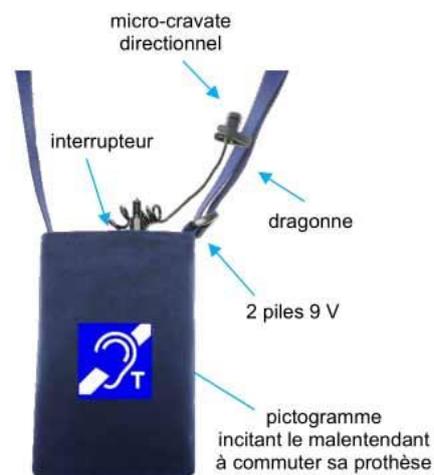

La mise en œuvre de boucleTTe

- Avant de partir à la rencontre des malentendants, mettre des piles neuves
- Ranger le boîtier dans son étui, régler le cordon
- Garder **boucleTTe** sur arrêt positionner le micro-cravate.

En présence du malentendant appareillé « T » :

- Allumer **boucleTTe**, parler de façon intelligible
- Eviter le bruit ambiant
- Se tenir à moins de 80 cm de l'interlocuteur
- Eteindre boucleTTe dès la fin de l'entretien, la consommation devient insignifiante



logement pose rapide
2 piles



pile 9 V