

Manuel d'utilisation

LG EVACU PLUS

Le fauteuil d'évacuation LG EVACU PLUS permet le transport sécurisé d'une personne à mobilité réduite dans les escaliers d'un bâtiment grâce à son système spécifique à chenilles, conçu pour assurer une descente contrôlée.

Ce dispositif est exclusivement destiné à la descente des escaliers et ne permet pas leur montée. Le déplacement est entièrement assuré par le conducteur, au moyen des poignées dédiées, garantissant maîtrise et stabilité lors de l'évacuation.

La chaise se replie facilement après utilisation, facilitant ainsi son rangement et son stockage.



MONTAGE :

Le dispositif est livré monté, à l'exception de l'appui-tête.




UTILISATION :

Vérification du type de surface

Déterminer la pente des escaliers

Attention ! Avant d'emprunter un escalier pour la première fois, il faut s'assurer que son inclinaison respecte les paramètres établis. L'inclinaison maximale de l'escalier doit être de 39° (ce qui correspond à une pente de 81 %). Si vous ne connaissez pas la pente de l'escalier que vous devez emprunter, vous devez effectuer des mesures en vérifiant l'inclinaison en degrés (à l'aide d'une règle et d'un rapporteur) ou en mesurant l'augmentation de hauteur sur une longueur de 100 cm (elle doit être de 81 cm max).

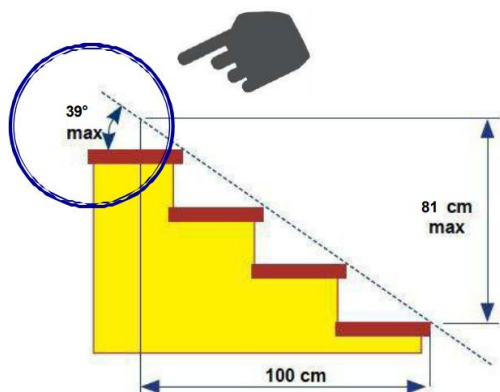

Conduite sur des escaliers

Le conducteur et le passager doivent veiller à ne pas porter d'écharpes longues ou de vêtements amples, car ceux-ci pourraient s'accrocher et constituer un danger.

Il ne faut jamais monter un escalier si le passager n'est pas en position verticale. Utiliser les ceintures de sécurité spécifiques pour attacher le passager au dossier.

- Avant et pendant le déplacement, vérifiez la bonne posture de la personne transportée.

Avant d'emprunter un escalier, il convient de vérifier ses caractéristiques :

- Pente de l'escalier.
- Dimensions des marches, comme décrit au chapitre 6.
- Elles ne doivent pas être recouvertes de tapis.
- Elles ne doivent pas être friables ou non finies, mais compactes.
- Elles ne doivent pas présenter d'arêtes irrégulières, cassées ou effritées.
- Elles ne doivent pas être mouillées ou glissantes.
- La conduite du véhicule doit toujours être effectuée avec une attention particulière et constante tant envers la personne transportée qu'envers l'environnement d'utilisation.
- Faites attention à la position de vos pieds pendant le mouvement.

Utilisation du dispositif


Pour commencer, déverrouillez la plate-forme de l'aide. L'étape suivante consiste à faire passer l'aide de la position fermée à la position ouverte. Pour ce faire, placez une main sur le guidon et l'autre à l'extrémité du siège. La main placée sur le siège doit exercer une force vers le bas. Observez attentivement les procédures illustrées ci-dessous.



 Avant d'utiliser l'aide, assurez-vous que le levier rouge est bien verrouillé.




Pour utiliser l'aide dans les escaliers, déverrouillez les chenilles à l'aide du levier rouge situé entre elles (voir illustration ci-contre). Le levier doit être tiré vers le haut en le faisant glisser le long de la fente. Les chenilles peuvent être repliées en effectuant l'opération inverse de la précédente.

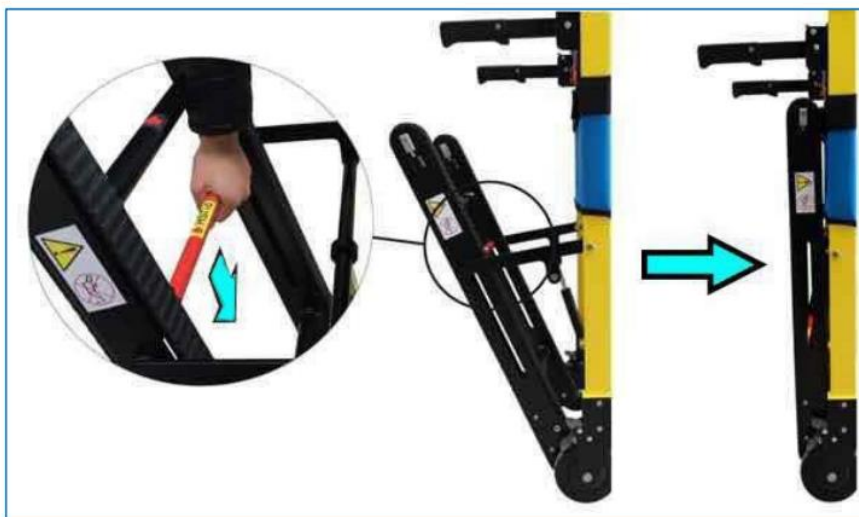

La hauteur de l'appui-tête peut être réglée en fonction des besoins du passager. Pour ce faire, tirez vers vous le levier rouge situé à l'arrière de l'appui-tête (comme illustré sur la figure ci-contre).

L'appui-tête comporte trois positions de réglage.

Si nécessaire, maintenir la tête du passager à l'aide de la ceinture de sécurité située sur l'appui-tête.

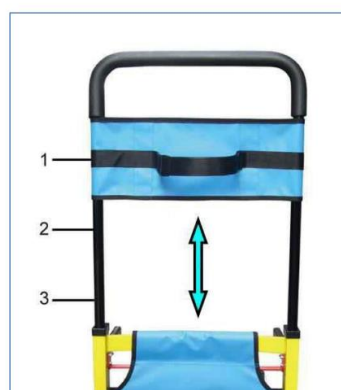

Le passager doit être correctement attaché à l'évacuateur à l'aide des ceintures de sécurité prévues à cet effet.
Le passager doit être bien droit et stable.


En maintenant enfoncés les boutons rouges des poignées arrière, celles-ci peuvent être ouvertes ou fermées (voir image ci-contre) avec un angle d'action de 90°.
Tout cela en fonction des besoins du conducteur.

En maintenant enfoncés les boutons de déverrouillage des poignées avant, celles-ci peuvent être allongées ou raccourcies en fonction des besoins de l'utilisateur.




En cas d'utilisation des poignées avant, il est recommandé qu'une deuxième personne se trouve à l'arrière de l'aide.

Déverrouillez les freins de la position ON à la position OFF.

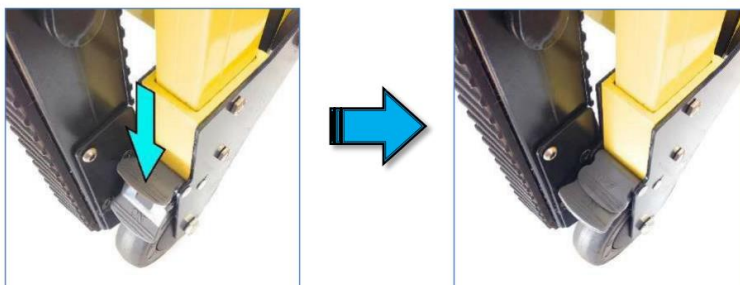

Monter l'appui-tête sur l'aide en suivant les étapes ci-dessous.

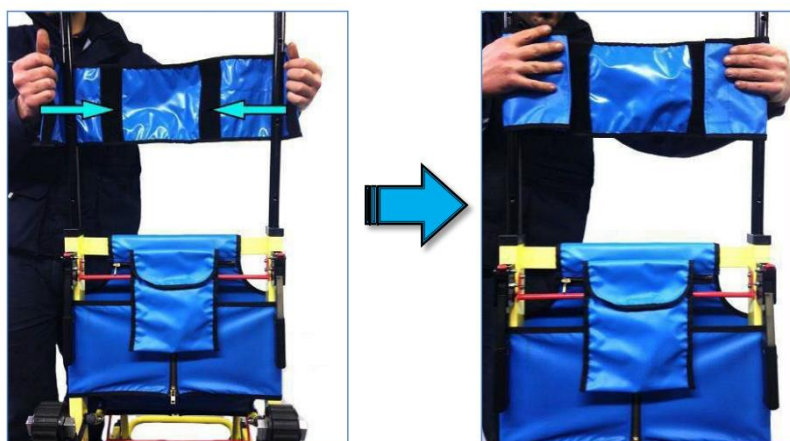

Avant de pouvoir descendre les escaliers avec le passager, tenez fermement le guidon de l'évacuateur et faites levier sur la tige située entre les deux chenilles. Cela permettra d'incliner l'évacuateur afin de pouvoir descendre en vous appuyant sur les chenilles (voir illustrations ci-dessous).

Le passager doit être en position verticale et stable, sans exclure l'application obligatoire des ceintures de sécurité.



Approchez-vous de l'extrémité de la marche, en maintenant l'inclinaison de l'évacuateur jusqu'à ce que les chenilles et la marche soient en contact (voir illustration ci-dessous).

Avancer pour descendre les marches, en maintenant une vitesse aussi constante que possible



Utilisation de chaussures fermées

En cas de blocage de l'aide, assurez-vous que les chenilles sont bien en contact avec les marches (voir illustration ci-dessous). Une fois la stabilité de l'aide assurée, demandez de l'aide.



Une fois arrivé à la dernière marche, appuyez les roues arrière sur le sol, puis appuyez les roues avant (voir illustrations ci-dessous).



À la fin de l'utilisation, fermez l'aide en suivant les procédures de fermeture, en effectuant les étapes inverses de celles de l'ouverture. Tenez compte du fait que pour fermer le siège, vous devez tirer le levier situé sous le siège vers l'avant de l'aide, en suivant le chemin de la fente

